


ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI

SZYBKA INSTRUKCJA WPROWADZAJĄCA


DIAGNOSTIC®
GOLD CARE

Niniejsza instrukcja pomoże Ci ustawić i przygotować glukometr do przeprowadzenia badań. Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja Używania dołączona do zestawu Diagnostic Gold Care.

1. OPIS GLUKOMETRU

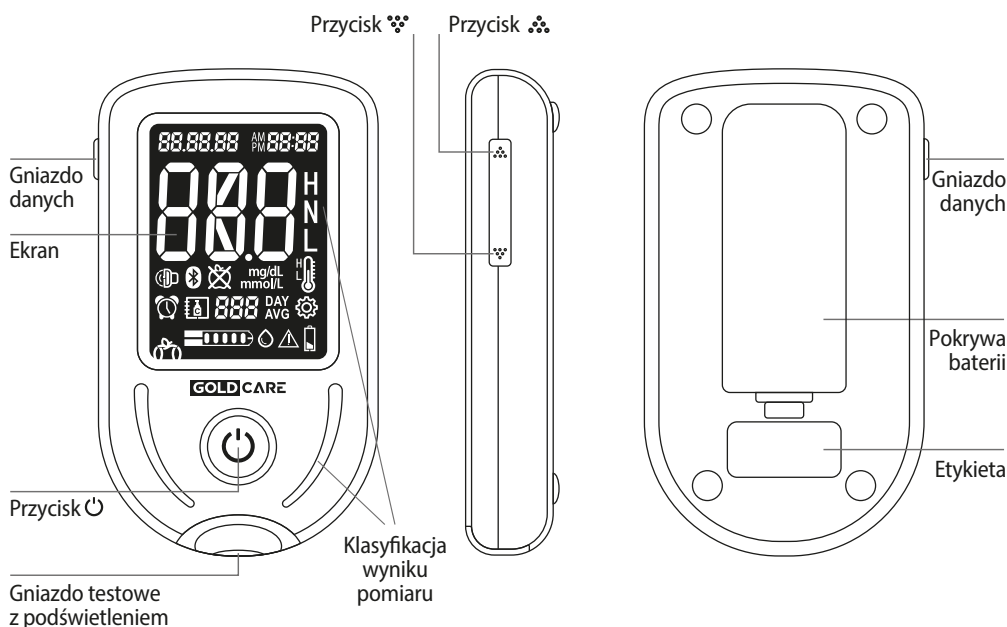

2. WKŁADANIE ORAZ WYMIANA BATERII

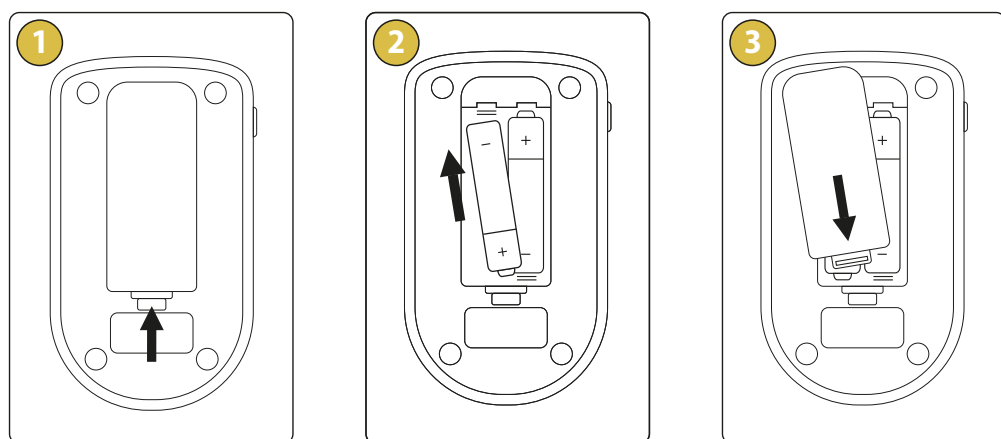


Otwórz pokrywę przesuwając do przodu plastikowe wgłębienie w pokrywie baterii.


Umieść baterie w przegrodzie pamiętając o odpowiednim ułożeniu biegunów (+ i -).

Wsун pokrywę baterii z powrotem na swoje miejsce.


3. USTAWIENIE DATY I GODZINY

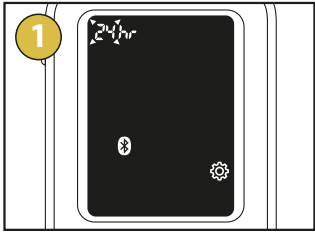


Wciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 4 sekundy przy wyłączonym urządzeniu, aby przejść do trybu wybrania formatu czasu. Wciśnij  albo , aby wybrać format "24hr" albo "12hr". Zatwierdź wybór przyciskiem .

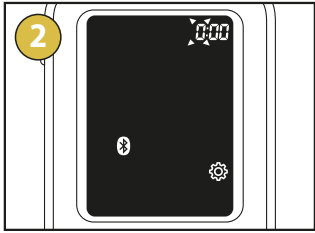


Użyj przycisków  i , aby wybrać godzinę. Zatwierdź wybór przyciskiem .

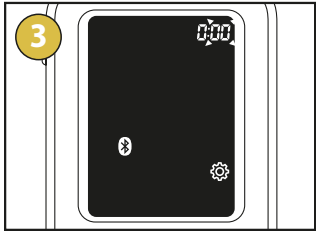


Użyj przycisków  i , aby wybrać minutę. Wciśnij przycisk , aby zatwierdzić ustawienia.

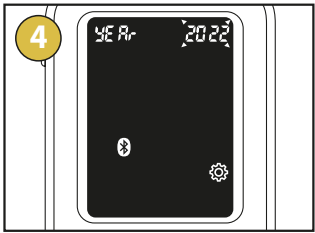

Użyj przycisków  i , aby wybrać rok. Wciśnij przycisk , aby zatwierdzić ustawienia.

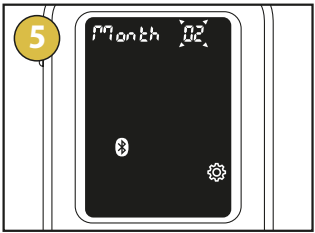


Użyj przycisków  i , aby wybrać miesiąc. Wciśnij przycisk , aby zatwierdzić ustawienia.

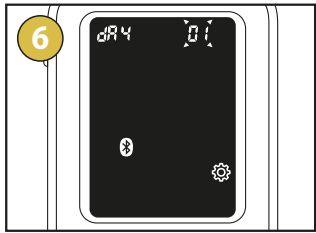


Użyj przycisków  i , aby wybrać dzień. Wciśnij przycisk , aby zatwierdzić ustawienia.


4. PRZYGOTOWANIE NAKŁUWACZA

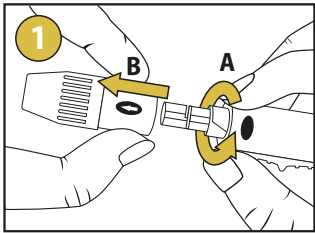


Przekręć i ściągnij nasadkę nakłuwacza.

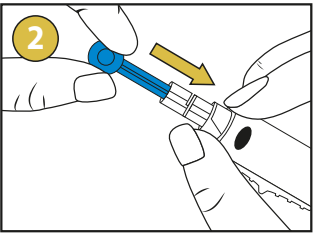


Umieść stabilnie lancet w uchwycie lancetu.

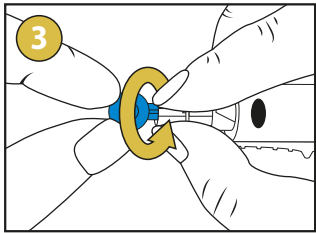


Ostrożnie okręć i zdejmij końcówkę ochronną lancetu.

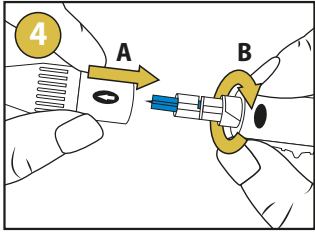

Nałóż nasadkę nakłuwacza i dokręć ją.

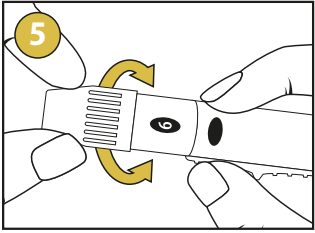


Ustaw głębokość nakłucia skóry, obracając końcówkę nakłuwacza.

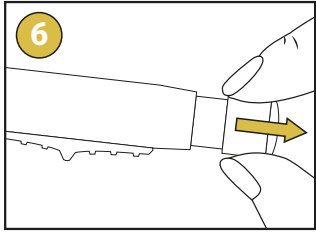


Odciągnij przycisk naciągający do oporu, a następnie go puść.


5. PRZEPROWADZENIE BADANIA

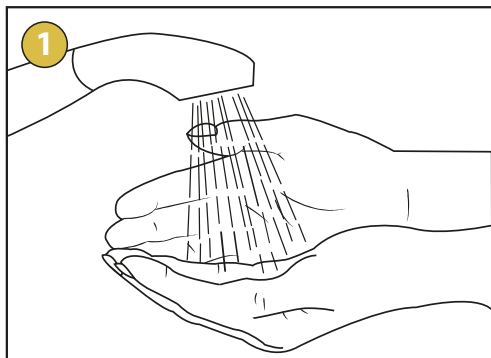


Przed przystąpieniem do pomiaru umyj ręce wodą z mydłem, a następnie osusz.

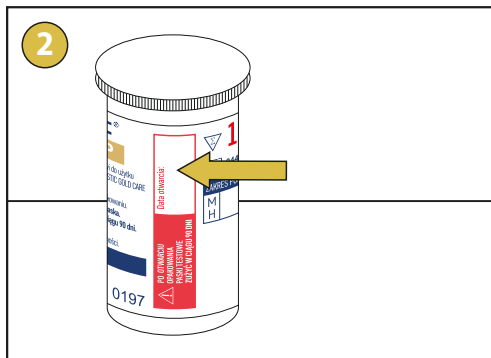


Zapisz datę pierwszego otwarcia pojemnika. Wymij pasek testowy i zamknij szczelnie opakowanie.

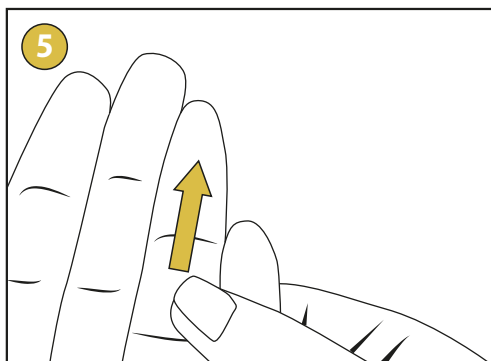

Rozmasuj energicznie miejsce pobrania krwi.

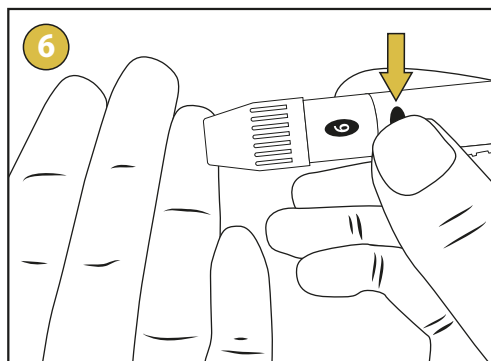


Przyłóż nakłuwacz do miejsca planowanego nakłucia i wciśnij przycisk zwalniający. Kliknięcie oznacza, że nakłucie zostało wykonane.

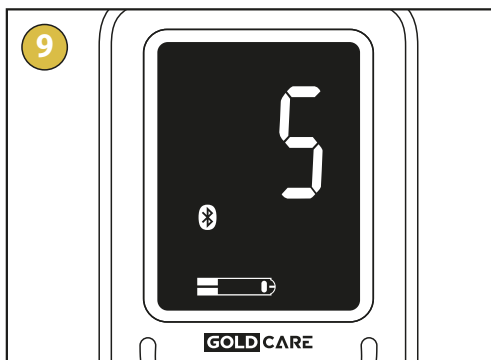


Gdy żółte okienko paska testowego zostanie wypełnione krwią, urządzenie rozpocznie odliczanie od 5 do 1




Jeśli nie oznaczyłeś wcześniej pomiaru (krok 4), możesz to zrobić teraz. Znak jabłuszka będzie migał, aby Ci o tym przypomnieć.

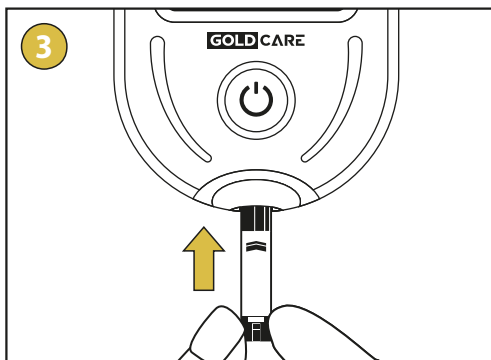


Włóż pasek testowy do glukometru. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się symbol paska testowego i migający znak .

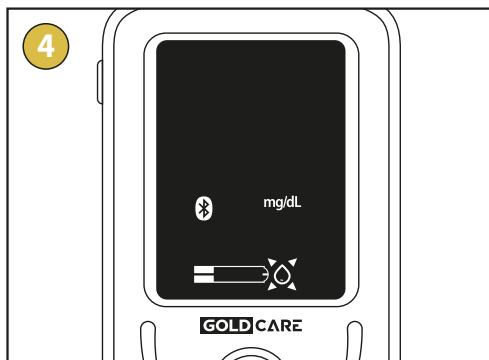

Wciśnij  lub , aby wybrać pomiar przed posiłkiem  po posiłku  lub na czczo .

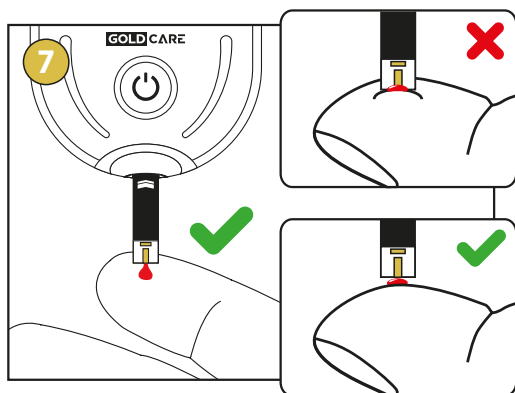

Przyłóż pasek testowy umieszczony w glukometrze do kropli krwi. Zostanie ona automatycznie zassana.

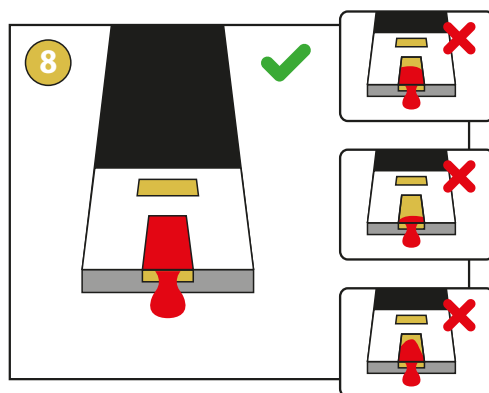

Upewnij się, że żółte okienko jest całkowicie wypełnione krwią.



Wybierz  lub , aby oznaczyć pomiar jako przed posiłkiem  po posiłku  lub na czczo . Zatwierdź wybór przyciskiem .

INFOLINIA

CZYNNA:
poniedziałek–piątek

W GODZINACH:
8⁰⁰–16⁰⁰

800 70 30 11
dla telefonów stacjonarnych
połączenie bezpłatne

+48 85 874 69 28
dla telefonów komórkowych
(koszt połączenia ponosi
dzwoniący zgodnie z taryfą
operatora)

 Diagnosis S.A.,
ul. Gen. W. Andersa 38A,
15-113 Białystok, Polska
www.diagnosis.pl

 0197

Rev. 2023.03.27 v.1